

Appliceringsguide – Sakral

PICO – nem at applicere på svært bandagerbare sår

1



Rens og forbered såret og den omgivende hud i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Sørg for at huden er tør før applicering.

Klip en smal strimmel af RENASYS Gelplade, og fjern den ene af beskyttelsesfilmene. Fold gelpladen/strimlen.

2



Skil balderne en smule ad og applicer gelstrimlen neden for såret. Hold fast på strimlen for at varme den på plads og udglat den med fingeren for at sikre en god fiksering.

Fjern den øvre beskyttelsesfilm. En gelstrimmel kan desuden appliceres oven over såret, proksimalt om såret for optimal forsegling.

3



Vælg en passende størrelse bandage og placering af porten. For sår med op til 1,5–2 cm dybde kræves ikke ekstra sårfyldningsmateriale, idet bandagen leverer tryk direkte mod sårbunden. For dybere sår anbefales gaze eller skum til at fylde sårbunden med.

4



Fold bandagen for nemmere at kunne placere silikonekanterne ovenpå gelstrimlerne.

5



Applicér bandagen og sørg for at bandagen ligger helt tæt mod gelstrimlen og mod huden.

6



Hold fast med fingeren for at sikre tæt forsegling mellem bandagen og gelstrimlen.

7



Fjern resten af beskyttelsesfilmen på bandagen.

Folder og fejlplacering kan justeres ved at løfte og re-applicere bandagens silikonekanter.

8



Udglat bandagen med fingeren langs med klæbekanten og tryk til for at fjerne eventuel luftlækage.

9



Tag pumpen ud af emballagen.

Isæt batterierne.

Kobl slangen sammen med pumpen.

Tryk på den orange knap for at starte PICO-pumpen.

10



Følg med fingrene over bandagen og udglat hen over såret og den omkringliggende hud. Bandagen skal føles stiv og hård.

Luften i bandagen er fjernet og har skabt undertryk. Pumpen blinker med grønt lys.

11



For yderligere fiksering under behandlingen, kan de medfølgende fikseringsstrimler appliceres rundt om bandagens kanter. Undlad at dække selve sårpuden. Overlap med 1 cm anbefales.

Fjern beskyttelsesfilmen på fikseringsstrimlerne efter applicering.

12



Bandagen er på plads og sårbehandling med negativt tryk leveres til såret.

Skift bandagen ved behov i løbet af pumpens levetid (7 dage). Anvend den ekstra medfølgende bandage.



Kontakt os for yderligere information
Smith & Nephew,
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm
Telefon 45 80 61 00
Fax 45 80 61 51

www.smith-nephew.com
sn.dk@smith-nephew.com

° Varemærke tilhørende Smith & Nephew
© Smith & Nephew januar 2014
14-0002